

Auszüge aus dem Reinigungs- und Desinfektionsplan



Das Tragen von Schmuck / Uhren an Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet.
Gesetzlich Vorgaben: TRBA 250, MPG, RKI-Richtlinien

WAS?	WANN?	WOMIT?			WIE? / Verantwortlich?
Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz.	EWZ	Durchführung
Atemgürtel	nach Benutzung	Wäscherei			Die Teile in einem Plastikbeutel sammeln und zum Waschen in die Wäscherei geben. Waschbar bei 60°C! Pflegekraft
Bedienungsfelder: Monitor, Perfusor	1x täglich nach Kontamination sofort	Mikrobac forte	0,5 %	1 Std.	Wischdesinfektion Bedienungsfelder. Pflegekraft
CO2-Sonde	nach Benutzung	Mikrobac forte	0,5 %	1 Std.	Wischdesinfektion. Pflegekraft
EEG-Elektroden	nach Gebrauch	Mikrobac forte			Im Wasser die Paste lösen dann reinigen mit Zahnbürste (beschriftet mit Datum, EEG; nach 24 Stunden entsorgen) und dann mit Microbac forte Wischdesinfektion EEG-Pflegekraft
EKG-Elektroden	nach Gebrauch				Einmalprodukt: Restmüll entsorgen. Pflegekraft
Schnarchmikrofon	nach Benutzung	Mikrobac forte	0,5 %	1 Std.	Wischdesinfektion. Pflegekraft